

Nos complace contar con esta opción segura, efectiva y confiable para eliminar el dolor y la ansiedad de nuestros pacientes durante el tratamiento de sus arañas vasculares.

Pregúntele a su médico si es posible que usted lo necesite.



📍 venasyarteriassaludables
📱 Venas y Arterias Saludables
www.venasyarterias.com

📞 Citas Policlínica Metropolitana:
+58 212 985 7723, +58 212 908 0660

✉ cf.fernandez@venasyarterias.com

📱 Whatsapp: +58 412 607 9774

🌐 www.venasyarterias.com

📷 [venasyarteriassaludables](https://www.instagram.com/venasyarteriassaludables)



**ADIÓS AL DOLOR
Y A LA ANSIEDAD
CUANDO INYECTAN
TUS ARAÑAS
VASCULARES
CON PRO-NOX**

La alternativa segura y confortable que elimina la preocupación durante tus procedimientos para tratar tus arañas vasculares

TÚ CONTROLAS EL ALIVIO CON PRO-NOX

Pro-Nox es un sistema de administración de oxígeno y óxido nítrico que te permite controlar el dolor en forma segura mientras se eliminan tus arañas vasculares.

El sistema cuenta con una válvula especialmente diseñada que te permite controlar de manera voluntaria, cada vez que inhalas, la administración de la mezcla de los gases medicinales que eliminan el dolor y la ansiedad. Tú decides cuándo administrarla, cuándo inhalar la mezcla de gases y por cuánto tiempo, estando permanentemente consciente y en capacidad de accionar tu propia voluntad. Esta disminución de la sensación de dolor sin afectar la consciencia es conocida como analgesia.

EFFECTO Y RECUPERACIÓN INMEDIATA

El efecto se siente después de unas pocas respiraciones a través de la boquilla o la mascarilla, con alivio inmediato del dolor y la ansiedad. No hay agujas ni medicinas. Cuando el dolor desaparece tomas unas cuantas respiraciones normales sin la boquilla o mascarilla y el óxido nítrico es exhalado rápidamente fuera de tu cuerpo.

¿ES SEGURA LA ADMINISTRACION DE ÓXIDO NITROSO?

La mezcla a partes iguales, 50/50, de óxido nítrico y oxígeno ha sido utilizada en el mundo a lo largo de décadas. Numerosos estudios clínicos han demostrado que no es adictivo y que disminuye el uso de otros calmantes.



Esta alternativa para el manejo del dolor ha sido utilizada en diversas especialidades como odontología, medicina estética, urología, cirugía plástica, dermatología, traumatología, durante el trabajo de parto, en muchísimos hospitales alrededor del mundo y por varias décadas.

PREGUNTAS FRECUENTES

¿Cómo funciona Pro-Nox?

El equipo está calibrado para garantizar la administración de una mezcla perfecta, 50/50, de óxido nítrico y oxígeno, durante cada inspiración. Respire manteniendo la boquilla o mascarilla en o cerca de su cara, según le indique su médico. Una respiración normal, inhalando y exhalando normalmente, le producirá alivio del dolor y la ansiedad.

¿Hay algún efecto indeseado durante su uso?

Muy pocos pacientes podrían tener algo de náuseas. Respirar un par de veces sin la boquilla o mascarilla eliminará esa sensación.

¿Tengo que respirar por la boquilla o mascarilla durante todo el procedimiento?

NO, respire por el sistema según lo necesite para aliviar el dolor y la ansiedad, o tal como le indique su médico.

¿Se necesita alguna preparación especial para usar el Pro-Nox?

NO, no hay nada que usted deba hacer previo a o en preparación para usar el sistema.

¿Puedo manejar por mi cuenta después del procedimiento?

SÍ. En menos de cinco minutos después de la última inhalación, el óxido nítrico se elimina por completo de su organismo, finalizando su acción.